



Kitfort

Время для себя!



Penguin Pack
Массажер
КТ-2978

kitfort.ru



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство массажера.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	13



Общие сведения

Массажер КТ-2978 поможет избавиться от мышечной усталости, боли и спазмов. Использование массажера помогает в борьбе с лишним весом и целлюлитом, делает кожу более упругой и подтянутой.

Вращательные и вибрационные движения насадки улучшают кровообращение и лимфоток, а также способствуют насыщению крови кислородом и выведению токсичных продуктов метаболизма из организма. Воздействие насадки на проблемные участки тела приводит к сжиганию жира за счет ускорения метаболизма. Но важно помнить, что в борьбе с лишним весом и целлюлитом важен комплексный подход. Для максимального результата массаж необходимо сочетать с физической активностью и правильным питанием.

Массаж воздействует на глубокие слои кожи, стимулируя обновление всех уровней кожного покрова. Благодаря этому повышается эластичность связок и подвижность суставов.

Проведение массажа повышает тонус мышц, расслабляет и снимает усталость, напряжение и болевые ощущения, которые могут возникнуть после долгого сидения за компьютером, из-за неудобной позы во время сна или при сидячем образе жизни.

Прибор предназначен для проведения ротационного массажа различных частей тела. Четыре съемные насадки обеспечивают универсальность использования устройства — можно проработать все проблемные места шеи, рук, плеч, живота, икроножных мышц, бедер и спины. В комплекте есть насадка-сетка, которая надевается на основную насадку, чтобы волосы не попали во вращающиеся части устройства во время массажа шеи.

Насадки легко отсоединяются и очищаются, поэтому для улучшения эффекта от массажа процедуру можно проводить с использованием антицеллюлитных кремов и лосьонов, а также массажных масел. Функция инфракрасного нагрева усиливает эффект от проведения массажа и повышает эффективность косметических средств, используемых во время массажа. Плавная регулировка интенсивности позволяет подобрать наиболее комфортную скорость вращения насадки.


Модель КТ-2978 имеет удобную форму и ручку, что способствует комфортному проведению самомассажа. Массажер может использоваться спортсменами перед, во время и после тренировок, поможет расслабить мышцы спины и шеи офисным работникам.

Комплектация

1. Массажер — 1 шт.
2. Насадка-сетка — 1 шт.
3. Волнообразная насадка — 1 шт.
4. Шариковая насадка — 1 шт.
5. Роликовая насадка — 1 шт.
6. Пальчиковая насадка — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера

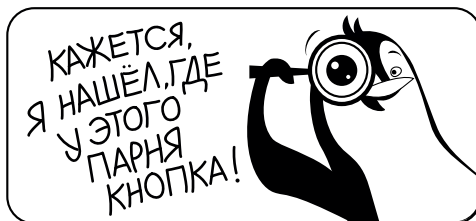



Переключатель имеет три положения:

- нижнее положение — массажер выключен;
- среднее положение — массажер включен;
- верхнее положение — массажер включен с функцией инфракрасного прогрева.

Инфракрасный нагрев усиливает эффект от проведения массажа и повышает эффективность косметических средств, используемых во время массажа.

Регулятор скорости плавно меняет скорость вращения насадки для выбора интенсивности массажа. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость вращения насадки (интенсивность массажа), и против часовой стрелки, чтобы уменьшить скорость вращения насадки (интенсивность массажа).

Насадки

Насадка-сетка предназначена для использования поверх других насадок. Она позволяет избежать попадания волос во вращающиеся части устройства во время проведения массажа шеи.

Примечание. Не используйте косметические средства, если используете насадку-сетку.

Волнообразная насадка имитирует разминающий массаж, выполняемый ладонью. Использование насадки тонизирует и улучшает циркуляцию крови.

Роликовая насадка предназначена для комплексной проработки жировой прослойки. Насадка используется для борьбы с лишним весом и целлюлитом.

Пальчиковая насадка имитирует массаж, выполняемый пальцами. Она стимулирует приток крови, тонизирует мышцы, выполняет лимфодренажный массаж. Данная насадка также используется для проведения антицеллюлитного массажа и массажа стоп.

Шариковая насадка подходит для деликатных зон, таких как шея и живот. Улучшает кровообращение, придает коже упругость, выводит локализованные токсины и улучшает работу кишечника при проведении массажа живота.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство и насадки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Прозеинфицируйте насадки: их можно протереть ватным диском, смоченным в 75% растворе спирта или хлоргексидине.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделами «Советы» и «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
2. Снимите украшения (цепочки, браслеты, длинные серьги) и соберите волосы, чтобы они случайно не попали во вращающиеся части массажера. Если вы про-

водите массаж через одежду, то убедитесь, что в зоне массажа нет посторонних предметов: молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движения.

3. Кожа должна быть чистой. При желании нанесите на кожу косметические средства для достижения лучшего эффекта от массажа (антицеллюлитный крем, массажное масло и пр.).
4. Установите одну из насадок до упора на вращающийся диск прибора.

Примечание. Устанавливайте и снимайте насадку, только когда устройство отключено от сети питания.



5. Если вы планируете проводить массаж шеи без использования косметических средств, то закройте установленную насадку насадкой-сеткой, закрутив ее до упора.
6. Убедитесь, что переключатель находится в нижнем положении. Подключите устройство к сети электропитания.
7. Переведите переключатель в среднее положение — массажер начнет работать. Чтобы включить функцию инфракрасного прогрева, переведите переключатель в верхнее положение.
8. Поворачивайте регулятор скорости, чтобы изменить интенсивность массажа (скорость вращения насадки).

Внимание! Если вы только начинаете пользоваться массажером, устанавливайте минимальную интенсивность. Проследите за реакцией организма на массаж. Возможно небольшая мышечная боль после массажа, сравнимая с болью в мышцах после тренировки. После нескольких процедур массажа на небольшой скорости вы можете попробовать увеличить скорость.

9. Прислоните насадку к области тела, на которой собираетесь производить массаж. Перемещайте массажер по поверхности тела плавными круговыми движениями, следуя направлению массажных линий, не надавливая на массажер. Массаж каждой зоны должен длиться от 15 до 60 секунд, а общее время процедуры — не более 15 минут.
10. Переведите переключатель в нижнее положение, чтобы выключить массажер.
11. Отключите устройство от сети питания.





12. После каждого использования массажера мойте насадки в теплой воде с мылом.

Внимание! Не используйте массажер в области сердца, на лице и голове, передней поверхности шеи, костных выступах, точках пульсации, непосредственно на позвоночнике, суставах, лимфоузлах и слизистых оболочках.

Не давите слишком сильно на кожу во время массажа. При дискомфорте во время массажа прекратите процедуру и обратитесь к врачу. Возможно временное покраснение кожи после использования прибора. Если краснота не прошла в течение 15–20 минут, обратитесь к врачу. Если у вас хрупкие сосуды, будьте осторожны при пользовании массажером и перед полноценным массажем проследите за реакцией кожи и сосудов.

Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью: ванной, бане и сауне. Следите, чтобы кожа была сухой, берите массажер только сухими руками.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Не используйте массажер перед сном.
4. Используйте массажер не менее, чем через час после приема пищи.
5. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - беременность;
 - варикозное расширение вен, тромбофлебит;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств при заболеваниях сердца, например, кардиостимулятора;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышение температуры;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - переутомление.

Советы

Не прижимайте массажер сильно к массируемым частям тела. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Увеличивайте интенсивность массажа постепенно. Время проведения массажа зависит от ощущений человека, в среднем от 3 до 15 минут. Каждый сеанс должен длиться не более 15 минут.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться гематомы и болевые ощущения в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно.

Вы можете проводить процедуру самостоятельно или воспользоваться помощью другого человека.

Мышцы массируемого участка тела должны быть полностью расслаблены во время проведения массажа.

Массаж следует начинать с больших зон, постепенно переходя к небольшим зонам. Направление движения прибора при массаже разных частей тела:

- спина: от линии позвоночника к бокам;
- шея: от головы к спине;
- руки: от кистей рук к локтевым суставам, от локтевых суставов в сторону плечевых суставов;
- живот: по часовой стрелке;
- бедра и голени: вертикальные движения снизу-вверх;

Внимание! Никогда не проводите массаж непосредственно по позвоночнику!

• шея: от головы к спине;

• руки: от кистей рук к локтевым суставам, от локтевых суставов в сторону плечевых суставов;

• живот: по часовой стрелке;

• бедра и голени: вертикальные движения снизу-вверх;

Внимание! Никогда не проводите массаж внутренней стороны бедра, не проконсультировавшись с врачом! По внутренней поверхности бедра проходят основные вены, идущие от таза к ногам. Если неправильно воздействовать на лимфоузлы, это может привести к нарушению лимфотока и застою венозной крови.

- ягодицы: чередование вертикальных и круговых движений.

Чистка и обслуживание

Протирайте устройство и насадки мягкой влажной, а затем сухой тканью. Не используйте агрессивные моющие средства.

Для дезинфекции насадок их можно протереть ватным диском, смоченным в 75% растворе спирта или хлоргексидине. Также все насадки можно мыть в воде с мылом. Будьте осторожны при очищении насадки-сетки, чтобы не повредить ткань насадки.

Чистку следует производить после каждого использования, т.к. влага, кожный жир и пот могут привести к повреждению поверхности насадок.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадание жидкостей внутрь корпуса устройства, на шнур питания, регулятор скорости и переключатель.





Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении рекомендуется убрать массажер и насадки в коробку или пакет для защиты от пыли, а также чтобы не потерять насадки.

Устранение неполадок

Массажер не работает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Массажер не включен	Переведите переключатель в среднее или верхнее положение

Массажер нагрелся

Возможная причина	Решение
Устройство работало долгое время без перерыва	Выключите массажер, отключите его от источника питания и дайте ему остыть 30 минут

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 25 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Тип массажера: ротационный
5. Скорость вращения насадки: 8240–9040 об/мин
6. Длина шнура: 1,6 м
7. Размер устройства: 150 × 105 × 150 мм
8. Размер упаковки: 275 × 115 × 195 мм
9. Вес нетто: 1,0 кг
10. Вес брутто: 1,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус устройства, на шнур питания и органы управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.



4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на шнур питания и органы управления.
15. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
16. Не подносите включенный прибор к области сердца, лицу и голове, передней поверхности шеи, к точкам пульсации, костным выступам, непосредственно к позвоночнику, суставам и слизистым оболочкам.
17. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделами «Советы» и «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.

IM-1



Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона





ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

